

FÖRTYDLIGANDE AV IFU

Mätning av implantatstabilitet på distansnivå

Bakgrund


När man mäter implantatstabilitet på distansnivå skiljer sig vanligtvis ISQ (Implant Stability Quotient)-värdena från de som mäts på implantatnivå. Generellt ger mätningar på distansnivå lägre ISQ-värden. **För Nobel Biocare N1-systemet har dock högre värden observerats.**

Procedur för noggrann ISQ-mätning på distansnivå

För att få en korrekt ISQ-mätning på distansnivå, följ dessa steg:

- 1. Initial mätning:**
Utför en mätning på implantatnivå innan distansen installeras.
- 2. Mätning på distansnivå:**
Utför en mätning på distansnivå under samma patientbesök.
- 3. Bestäm offset:**
Notera skillnaden mellan mätningarna på implantatnivå och distansnivå.
Denna skillnad, eller offset, kommer att förbli konstant under hela läkningsperioden.
- 4. Uppföljningsmätningar:**
Under efterföljande uppföljningsmätningar, använd offset för att beräkna implantatets ISQ.

Om du använder Osstell Connect kan mätkurvan över tid se ut så här:

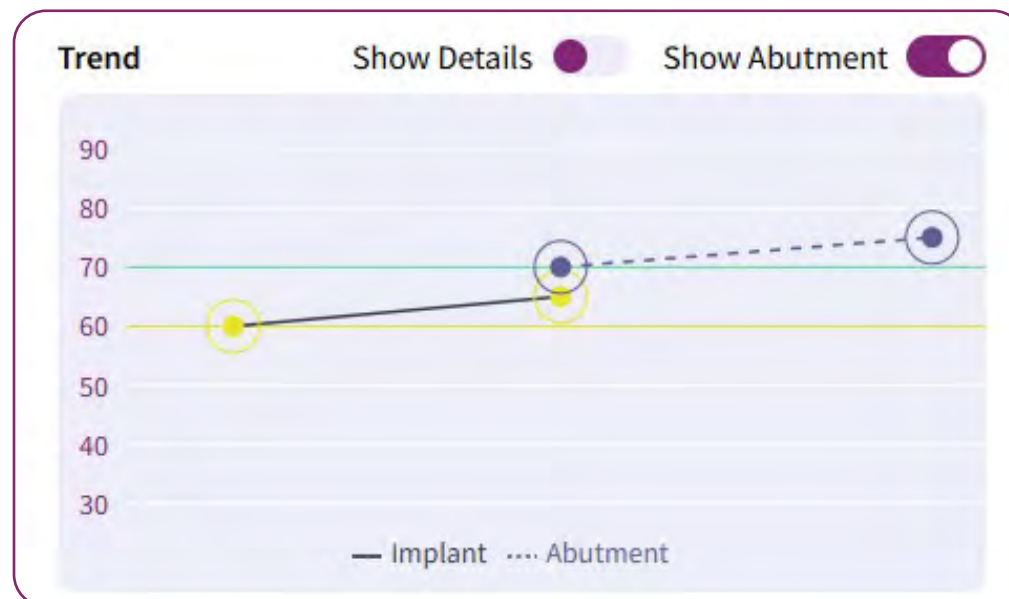

Följ alltid denna mätprocedur för att förhindra för tidig belastning, eftersom Nobel Biocare N1 kan uppvisa högre ISQ-värden på distansnivå.