


FLEXIBLE SCALER

FLEXIBLE SCALER Art. 268

Beskrivning: Mycket tunt rostfritt scalerstrips med perforeringar. Kanterna på dessa perforeringar är mycket vassa och tar bort interproximal tandsten, fläckar och rester av resin cement efter limning av porslinsrestaureringar.

Garanterad extrem noggrannhet i perforeringen. Kanterna på varje perforering fungerar som en interdental scaler.

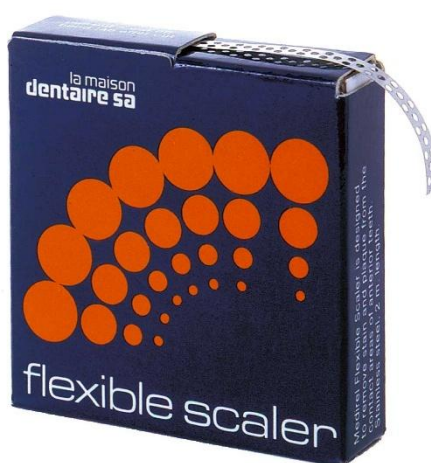

Användning

Klipp av den längd på remsan som du behöver för korrekt hantering. För in remsan i incisal- eller ocklusalembasuren och arbeta med den på framsidan och baksidan för att ta bort beläggningen. När du tar bort rescement är det klokt att flytta remsan från porslinet till tanden, åtminstone i början. Var försiktig så att du inte skär i tandköttet eller läpparna, eftersom kanterna är ganska vassa. Var också försiktig när du använder den på rotytor, där alltför aggressiva åtgärder kan ta bort för stora mängder cement. Vi rekommenderar inte att den används på komposit.

Sterilisering

Kan steriliseras med valfri metod och återanvändas eller kasseras efter varje användning.

Förpackning

Rulle i en självdoserande låda. Mycket kompakt och resurssnål.
Rostfritt stål, 2 m längd.

Anvisningar:

På sidan av lådan. Korta och enkla.

Fotografier tagna med elektronmikroskop som visar perforeringarnas mikrometriska relief.

