



I denna bruksanvisning hänvisas till följande artiklar:

| Blandningsblock<br>Slitstarkt specialpapper | 60 ark         | 40 ark       | 25 ark         | 35 ark         |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| REF                                         | 80800          | 80801        | 80802          | 80803          |
| Storlek                                     | universell (u) | liten (a)    | medium (b)     | stor (c)       |
| Mått                                        | 7,0 x 8,0 cm   | 3,5 x 4,5 cm | 12,5 x 18,0 cm | 15,0 x 24,0 cm |
| Förpackningsenhet                           | 10 blocker     | 10 blocker   | 10 blocker     | 5 blocker      |


| Anti-slip blandningsblock<br>Glidfri undersida | 60 ark         | 25 ark         | 35 ark         |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| REF                                            | 80820          | 80822          | 80823          |
| Storlek                                        | universell (u) | medium (b)     | stor (c)       |
| Mått                                           | 7,0 x 8,0 cm   | 12,5 x 18,0 cm | 15,0 x 24,0 cm |
| Förpackningsenhet                              | 10 blocker     | 10 blocker     | 5 blocker      |

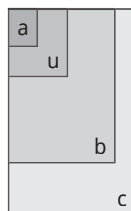


| Pergamentblandningsblock<br>Slitstarkt specialpapper | 75 ark       | 75 ark        | 75 ark         |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| REF                                                  | 80950        | 80951         | 80952          |
| Storlek                                              | liten (d)    | medium (e)    | stor (f)       |
| Mått                                                 | 4,0 x 4,0 cm | 7,0 x 10,0 cm | 14,0 x 20,0 cm |
| Förpackningsenhet                                    | 10 blocker   | 10 blocker    | 10 blocker     |

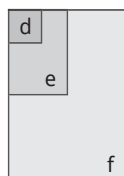

| Anti-slip folieblock<br>Glidfri undersida | 100 ark        | 100 ark       |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| REF                                       | 80830          | 80834         |
| Storlek                                   | universell (u) | stor (g)      |
| Mått                                      | 7,0 x 8,0 cm   | 8,0 x 14,0 cm |
| Förpackningsenhet                         | 1 block        | 1 block       |

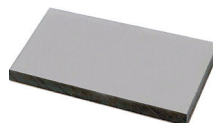

| Blandningsblock<br>Matt yta | 40 ark       |
|-----------------------------|--------------|
| REF                         | 80811        |
| Storlek                     | liten (a)    |
| Mått                        | 3,5 x 4,5 cm |
| Förpackningsenhet           | 12 blocker   |

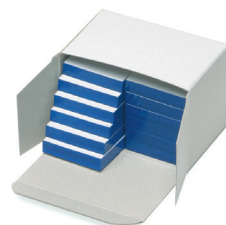

**REF** 80812, 80826, 80829, 80840, 80845, 80870, 80871, 80872, 80873, 80874, 80875, 80876, 80877, 80901, 80902, 80903, 80930, 80931, 80932, 80939, 80940, 80941, 80942, 80943, 80944, 80945, 80946, 80955, 80956, 80960, 80961, 80962, 80970, 80971, 80972, 80973, 80974, 80975, 81800, 81802, 81803

133645, 144114, 144115, 147667, 147684, 147685, 185744, 185968, 185969, 209927, 239720, 2820045, 2820050, 2820055, 2820110, 2820220, 2820245,

2500440, 2500441, 2500443,

496531, 496542, 498044, 498099, 498102, 500209, 500323, 500334,

5-639, 5-640, 5-641, 5-642, 5-698, 5-699,

704180, 704188, 704203, 704207, 704212, 704215, 7042218, 7042219,

7071, 7072, 7073, 7074,

90485, 90490,



CTB015, CTC050, CTC051, CTD021, CTM051, CTM052, CTP011,

PFU105, PSP18050


Ref. nr kan skilja sig från återförsäljarens ref. nr. Använd återförsäljarens referensnummer när du gör en ny beställning.



- 1** Tillämpning av de enskilda komponenterna: Applicera komponenterna på den övre delen av blandningsunderlaget enligt tillverkarens anvisningar.
- 2** Blandning av komponenterna: Blanda komponenterna enligt tillverkarens anvisningar tills en homogen massa erhålls.

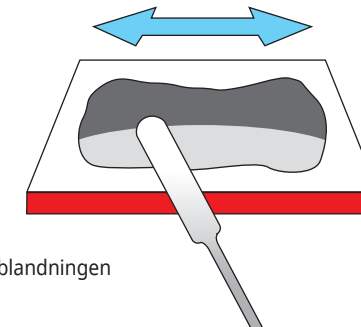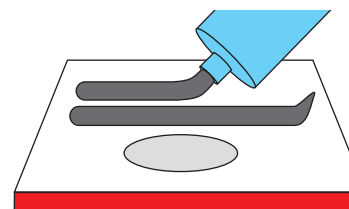

- 3** Ta bort blandningen: Du kan nu ta bort den färdiga blandningen från blandningsblocket för vidare bearbetning.

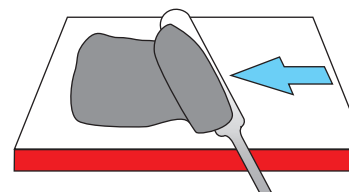

- 4** Bortskaffande: Riv av det använda arket från blocket och släng det i papperskorgen.

Status: 1 september 2022

### Avsett ändamål

Blandningsblocken används för manuell blandning av olika komponenter i tandcement, kompositer eller avtrycksmaterial i tandläkarmottagningen. De enskilda sidorna av blandningsblocket för engångsbruk fungerar som en yta på vilken de enskilda komponenterna appliceras. Efter blandning på blandningsblocket kan materialet användas direkt från blandningsblocket.

### Uppgifter om prestanda


Produktens engångsanvändning minskar risken för korskontaminering mellan olika tillämpningar eller patienter jämfört med produkter med flera användningsområden (t.ex. aluminium- eller glasplattor) och sparar tid (rengöring av produkter med flera användningsområden) i tandläkarmottagningen.

Den släta, vatten- och fettbeständiga ytan förhindrar att komponenter dras in i blandningsblocket. Den multipla dimensioneringen säkerställer hög stabilitet.

### Anvisningar om säker användning av produkten\*

- Den medicinska utrustningen får endast användas av (utbildad) tandvårdspersonal.
- Använd handskar vid användning.
- Använd ett nytt blad av blandningsblocket för varje användning.
- Släng det använda arket efter varje användning.
- Blandningskuddarna är engångsprodukter. Om produkten (ett enda ark) används mer än en gång kan korskontaminering och blandning av olika tandcement, kompositer eller avtrycksmaterial förekomma. Det blandade materialets egenskaper kan inte garanteras i detta fall.
- Använd inte en skadad eller förorenad plåt.
- Förvara produkten på ett mörkt och torrt ställe mellan 5 och 35 °C.

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

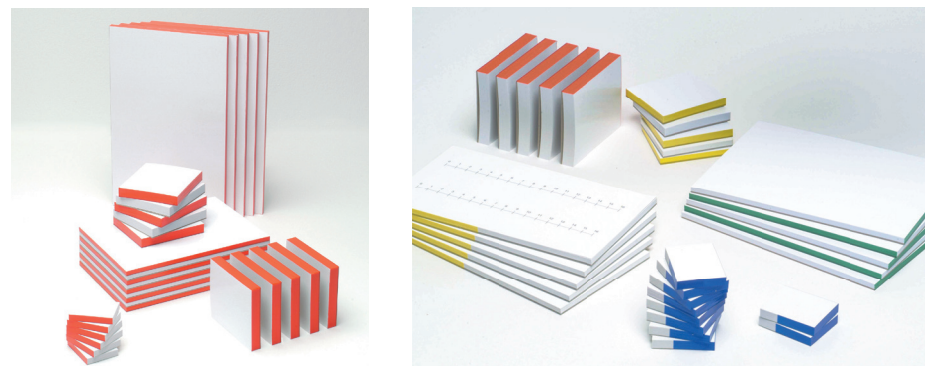

Lista med vanliga symboler som används på förpackningar och märkning av MGKS edicintekniska produkter enligt EU:s standard för medicintekniska produkter  
DIN EN ISO 15223-1:2022-02

|                                                                                       |                                   |                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Se bruksanvisningen               | <b>REF</b>                                                                            | Katalog- eller modell-nummer    |
|    | Får inte återanvändas             | <b>LOT</b>                                                                            | Satskod                         |
|    | Icke-steril                       | <b>MD</b>                                                                             | Medicinteknisk produkt          |
|    | Skyddas mot solljus               | <b>UDI</b>                                                                            | Unik produktidentifiering       |
|   | Förvaras torrt                    |  | Antal block                     |
|  | Utgångsdatum                      |  | Antal ark                       |
|  | Temperaturintervall för förvaring | <b>CE</b>                                                                             | CE-märkning om överensstämmelse |
|  | Tillverkare                       |                                                                                       |                                 |

\*Litteratur: <sup>1)</sup>Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene<sup>1</sup> - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>

<sup>2)</sup>Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011