

Restorative Solutions

Filtek™ Bulk Fill

Flytande Bulk Fill material



Bulk Fill

Stark nog

att få heta Filtek™

3M ESPE


Filtek™ Bulk Fill flytande komposit – minskar din behandlingstid utan att reducera din säkerhet.

Med trenden mot snabbare och enklare behandlingar, använder tandläkarna bulk fill flytande komposit i de posterior kaviteterna- där 70% av fyllningarna görs. Trots tidsbesparing med Bulk Fill ersättningar, är tandläkarna fortfarande oroliga för genomhärdning, krympning och styrka.

En snabb enkel 4mm placering reducerar antal steg och tid.

Ett sätt som tandläkarna använder för att undvika krympning är att lägga kompositen i flera lager - detta är tidskrävande och risk för kontaminering kan föreligga. Filtek™ Bulk Fill flytande komposit har utvecklats av 3M™ ESPE™, en utav de mest pålitliga utvecklare av tandfyllnadsmaterial, nu tar vi utmaningen med Bulk Fill flytande komposit, från början till slut.

Filtek Bulk Fill erbjuder en snabbare och enklare applicering, med mindre kymningsstress än många traditionella flytande och universala komposit. Placeras i 4mm lager.

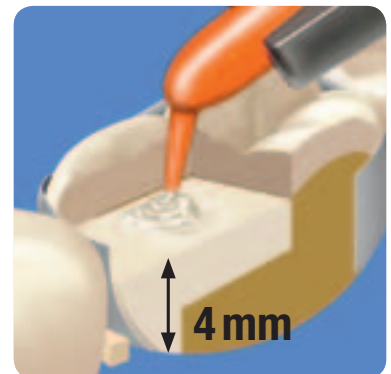


Filtek™ Bulk Fill flytande komposit kan placeras i ett 4 mm lager Källa: 3M ESPE interna data.

Den flytande konsistensen ger en enkel adaption

Du vill ha en flytande Bulk Fill som fäster lätt, och samtidigt eliminerar chansen för bubblor och som ger en god marginal försegling.

I en simulerad behandling, jämförde tandläkarna de ledande flytande Bulk Fill materialen med Filtek Bulk Fill, där denna visade sig vara excellent i hanteringsegenskaper och vidhäftning till kavitiesytan- med få eller inga instrument.

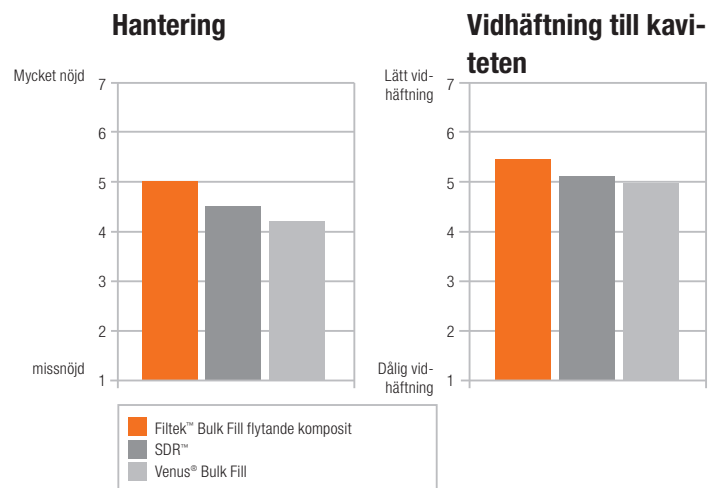

Fördelar :

- Upp till 50% starkare än de ledande flytande bulkfyllningsmaterialen.
- Nästan 2 gånger bättre nötningsmotstånd jämfört med ledande flytande bulkfillmaterial

- Applikationsval: kapslar eller sprutor
- Oranga färgen på förpackningen är lätt att känna igen och fråga efter
- 4 färger: A1, A2, A3, Universal

Materialets egenskaper inger förtroende.

Ett Bulk Fill material speciellt avsett för base/liner applicering i djupa posterior lagningar kräver ett djupt härdningsdjup och låg krympningsfaktor. Krympningen hos ett 4mm lager med Filtek™ Bulk Fill flytande komposit ligger i samma nivå eller lägre såsom hos många traditionella universala eller flytande komposit i 2mm lager (se diagram)

Du kan vara säker på att alla färger med Filtek™ Bulk Fill Flytande komposit säkerställer en härdning på 4mm enligt internationell ISO standard.


Här ser du varför du kan lita på Filtek Bulk Fill flytande komposit till sist.

Fyllningsmaterial som används i posteriora områden skall vara starkt och nötningsresistent. Filtek Bulk Fill flytande komposit uppfyller alla dessa krav.

- Upp till 50% högre styrka jämfört med ledande flytande bulkfyllningsmaterial¹
- Nästan dubbla nötningsmotståndet jämfört med ledande fly-

Det är det enda flytande bulkfillmaterialet som är starkt nog för att få kallas Filtek™.


Låg kuspdeformering av krympningsspänning efter placering av 4mm

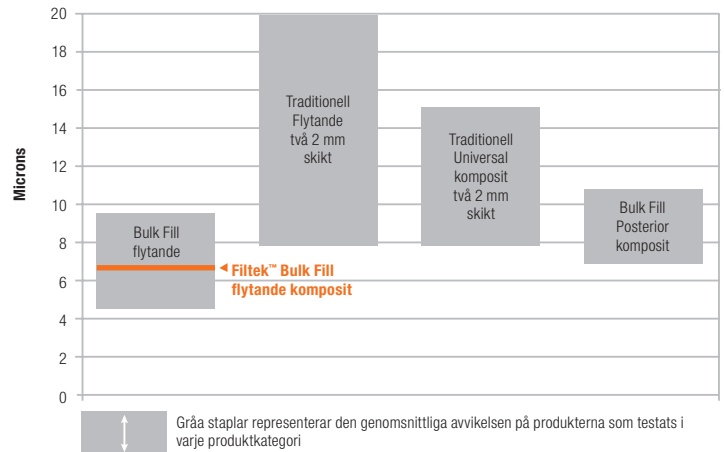

Källa: 3M ESPE interna data.




Högre tryckhållfasthet än ledande konkurrenter

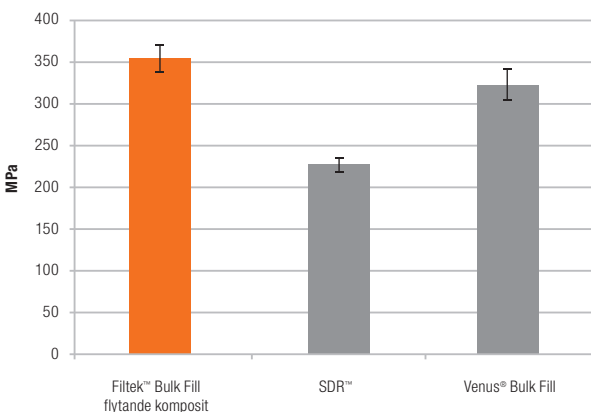

Källa: 3M ESPE Interna data.

Bättre nötningsmotstånd än ledande flytande bulkfillmaterial (3-body, in vitro)

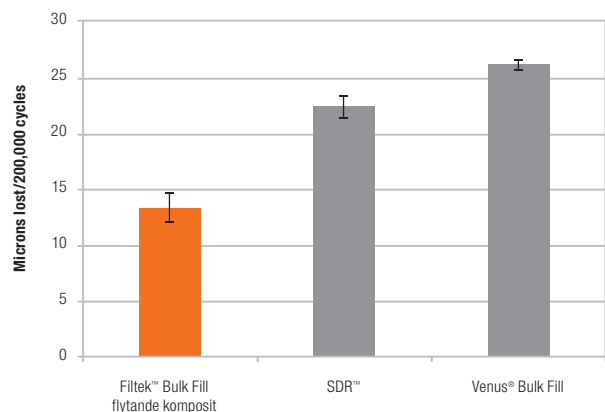

Källa: 3M ESPE. In vitro data.

Välj Filtek™ Bulk Fill flytande komposit för snabb och enkel posterior fyllning.



Preparera tanden och applicera en adhesiv, t.ex 3M ESPE Scotchbond™ Universal.



Dosera upp till 4 mm Filtek™ Bulk Fill i den preparerade tanden och ljushärda.



Placera ett täckande lager på 2mm (minimum) av en estetisk komposit, som t.ex en Filtek™ Supreme XTE universal komposit, och ljushärda.

Clinical photos courtesy of Dr. Reich, Seefeld, Germany

Beställningsinformation

Refiller

Färger	Sprutor	Kapslar
A1	4862A1	4861A1
A2	4862A2	4861A2
A3	4862A3	4861A3
Universal	4862U	4861U

Sprutrefillerna

Innehåller 2 – 2g sprutor; 20 intraorala spetsar; Teknisk guide; Bruksanvisning

Kapselrefiller

Innehåller 15 – 0.2g kapslar; Teknisk guide; Bruksanvisning.

Produktinformation

3740T	Filtek™ Bulk flytande komposit intraorala spetsar till sprutorna 20 orange intraorala spetsar
--------------	---



Filtek™ Bulk Fill flytande komposit Refill – Kapslar

Filtek™ Bulk Fill flytande komposit Refill – Sprutor



3M ESPE

3M Svenska AB
3M ESPE
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna Sverige
E-mail 3msvenskaab@mmm.com
www.3mespe.se
www.3MESPE.se

3M, ESPE, Filtek och Scotchbond är alla varumärken för 3M Company eller 3M Tyskland GmbH
Används under licence i Canada.
Alla andra varumärken ägs av andra företag.
©2012, © 3M. All rights reserved.