

Dra åt motståndet på skärm/arm


3Shape TRIOS MOVE

DRA ÅT ARMENS MOTSTÅND


Dra åt motståndet i armen – pga att den faller ner av sig själv eller har ett lösare motstånd än önskat.



1. Använd en Torx 8-mejsel
(Följer med din TRIOS Move
scanner vid leverans.)

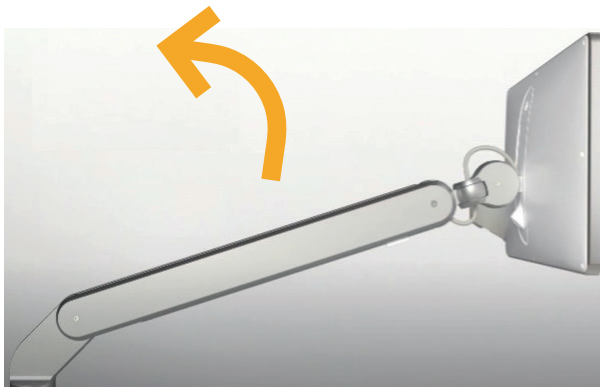

2. Armen på din TRIOS MOVE behöver ställas
i högsta möjliga läge för att skruven ska bli
åtkomlig.

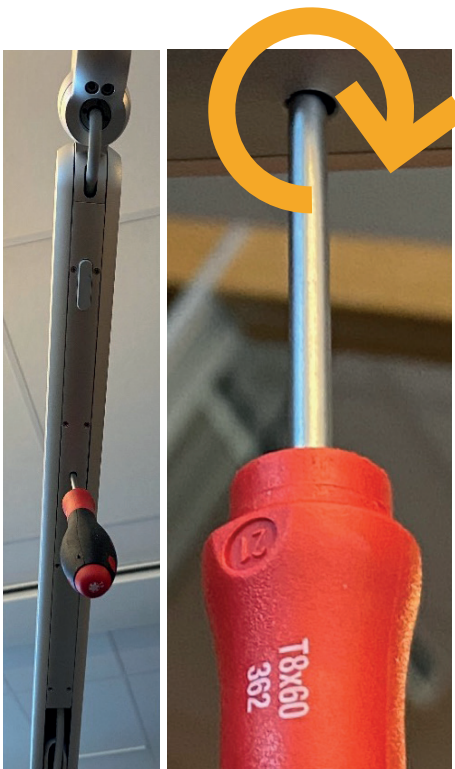

3. Hitta följande hål på undersidan av armen,
vicka lite tills det känns att mejseln fastnat i
skruven och rotera sedan medsols för att dra
åt motståndet

Dra åt motståndet på skärm/arm

3Shape TRIOS MOVE

DRA ÅT SKÄRMENS MOTSTÅND

Om skärmen "tippar fram" av sig själv eller om mer motstånd önskas, gör följande:



Använd en Torx 8-mejsel
(Följer med din TRIOS Move
scanner vid leverans.)



1. Sitter sladden till ett trådbundet
handstycke i skärmen, börja med att ta
bort den. Håll i den räfflade delen och dra ut.



2. Använd mejseln enligt bilden och
rotera medsols för att dra åt motståndet.