


# Sendoline<sup>®</sup>

## S3 System

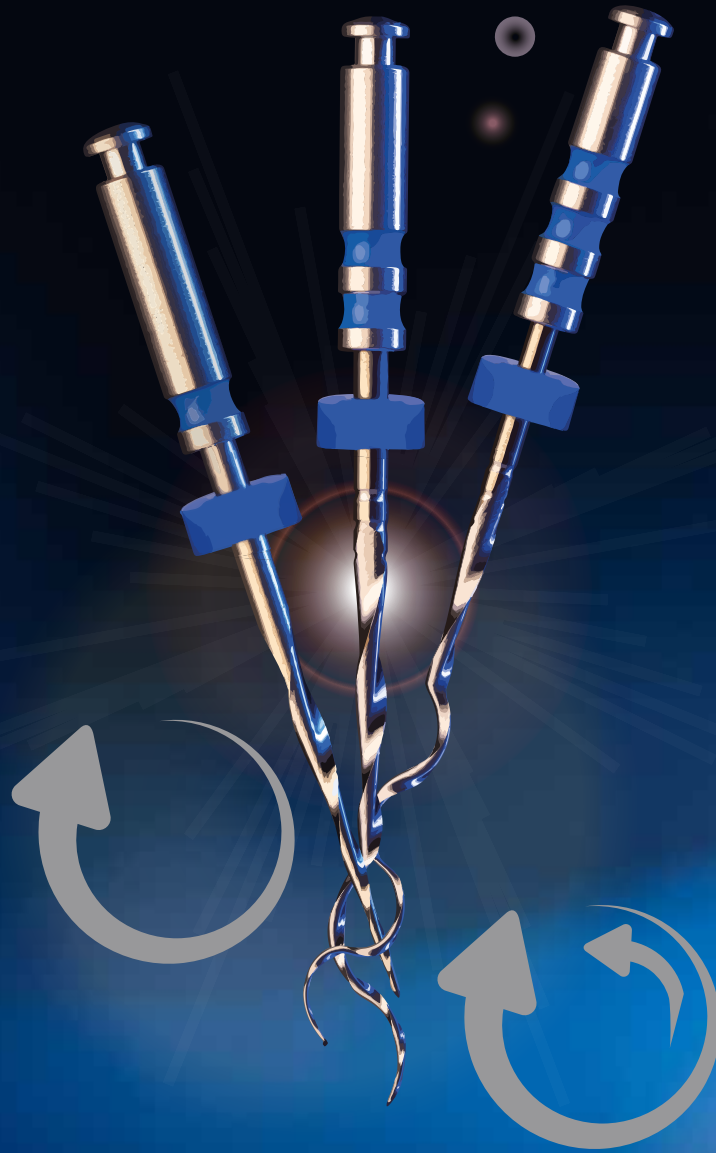

SV

PERFECT ENDO

# ONE SYSTEM – TWO MOVEMENTS

Roterande rörelse

Reciprokerande rörelse

## STEG-FÖR-STEG

### 1. Instrumenteringslängd

Använd en manuell handfil ISO #10 för att fastställa instrumenteringslängd.

### 2. S3 #1

#### Koronal preparation

Används endast för preparation av den koronala första tredjedelen av rotkanalen.

### 3. S3 Glidepath fil

#### - används till full instrumenteringslängd

Skapar en glide path preparation med god följsamhet även i mycket böjda kanaler och säkerställer en fortsatt god preparation av rotkanalen.

### 4. S3 #2 & #3

Avsluta preparationen av rotkanalen med hjälp av crown-down teknik. I många fall kommer du nå instrumenteringslängd redan med #2. Om det är mer böjda rotkanaler behöver du fortsätta med #3.



GP 20/04 #1 30/08 #2 30/06 #3 30/04

## FULL FLEXIBILITET

Alla Sendoline's S3 instrument är tillverkade i NiTi legering med varierad flexibilitet anpassad för den roll den spelar under rotbehandlingen. Detta är unikt för Sendoline S3 System.

Det första instrumentet i sekvensen, Sendoline S3 #1 är tillverkad i traditionell NiTi legering vilket förenklar preparationen av en rak ingångsriktning (straight line access). Instrument #2 och #3 inklusive den extra Sendoline S3 Glidepath är värmebehandlade. Den värmebehandlade NiTi legeringen tillsammans med instrumentets storlek ger varje fil i sekvensen en perfekt balans mellan flexibilitet och effektivitet.

## Sendoline S3 System med Sendoline Endo Motor

Sendoline S3 System kan användas med de flesta endodontimotorer. Sendoline Endo Motor har alla inställningar för Sendoline S3 System förinställt.

Om du föredrar att endast arbeta reciprokerande med S3-systemet kan du välja att använda Sendoline S1-vinkelstycket som du enkelt ansluter till din tandläkarunit.



Alla S3 instrument är designade med den unika S-profilen från Sendoline.

# PERFECT ENDO

## PRODUKTÖVERSIKT

REF	Produkt	Antal
S3193008BS	Sendoline S3 System #1 30/08 - 19 mm	6 st/fp
S3253006BS	Sendoline S3 System #2 30/06 - 25 mm	6 st/fp
S3253004BS	Sendoline S3 System #3 30/04 - 25 mm	6 st/fp
S3313006BS	Sendoline S3 System #2 30/06 - 31 mm	6 st/fp
S3313004BS	Sendoline S3 System #3 30/04 - 31 mm	6 st/fp
S3252004BS	Sendoline S3 Glidepath 20/04 - 25 mm	6 st/fp
S3312004BS	Sendoline S3 Glidepath 20/04 - 31 mm	6 st/fp
S301BS	Sendoline S3 System Assortment*	4 st/fp
S3S2222	Sendoline Endo Motor S3 Start Up Set**	Set
222200	Sendoline Endo Motor	Kit
6542472	S1-E Vinkelstycke S3 Assortment***	Kit

\*Innehåll: 1x S3 #1 30/08 19mm, 1x S3 Glidepath 20/04 25mm, 1x S3 #2 30/06 25mm,  
1x S3 #3 30/04 25mm

\*\*Innehåll: 1x Sendoline Endo Motor, 1x S3 #1 30/08 19mm, 1x S3 #2 30/06 25mm,  
1x S3 #3 30/04 25mm, 1x S3 Glidepath 20/04 25mm

\*\*\*Innehåll: 1x S1-E Contra-angle handpiece, 1x S1 Apex clip 2.0,  
1x Sendoline S3 System Assortment



Skanna QR-koden för  
mer information om  
Sendoline S3 System  
[www.sendoline.com](http://www.sendoline.com)

Allt innehåll i denna broschyr inklusive layout och bilder är  
skyddade av upphovsrätt. ©2023 Directa AB.  
Med ensamrätt.

BRO\_SendolineS3\_sv\_2023-02-20\_REV01

# DIRECTA