

Kalibrering

3Shape TRIOS


TRIOS 3 & 4 är beroende av regelbunden kalibrering för att säkerställa att scannern fungerar korrekt. När scannern inte är i bruk behövs ingen kalibrering (vid ex. semesterperioder) – men bör kalibreras igen, innan scanning ska genomföras på patient.

TRIOS 3 – 3D & Färgkalibrering görs var 7:e dag

TRIOS 4 – Kalibrering görs var 20:e scanning, baseras per spets

TRIOS 5 – Kalibreringsfri

3D-KALIBRERINGSHYLSA

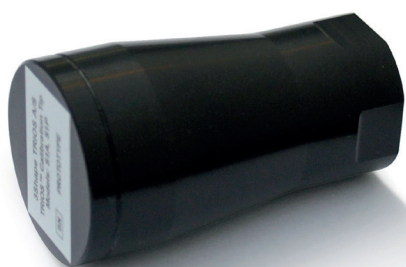

FÄRGKALIBRERINGSKIT



Färgkalibrering utförs med en scannerspets. Själva kalibreringen ställer höga krav på att spetsen är i gott skick och det är därför en god idé att spara en spets som endast används för kalibrering.



Uppstår slitage (som bilden visar) rekommenderas att ni köper nya spetsar, dessa är förbrukningsartiklar och kommer slitas med tid.

För att starta kalibreringen, gå till följande meny:

>> Mer / Inställningar / TRIOS-Scannerhantering

Följ stegen på skärmen, kontakta vår support vid frågor.