

Underhåll

Brilliant Smiles munskölj och tandkrämer innehåller aktiva ingredienser som löser upp ytliga missfärgningar och hindrar att nya missfärgningar fäster på tänderna. Alla produkter innehåller 1450 PPM fluor,

medan inga av produkterna innehåller skadligt slipmedel. Därför är munvårdsserien perfekt att använda dagligen för att bibehålla resultatet så länge som möjligt, samt för att bidra till god munhälsa.



Kontakta oss

Epost: info@brilliant smile.se

Hemsida: www.brilliant smile.se



BRILLIANT SMILE
SWEDEN



ALLT DU VILL VETA OM

TANDBLEKNING



BRILLIANT SMILE
SWEDEN

Tandblekning

Långt ifrån alla har naturligt vita tänder. För många av oss har vitheten minskat på naturlig väg med åren, medan andra faktiskt har mindre vita tänder från början. Missfärgningar är oftast ett resultat av mat, dryck, tobak och annat vi stoppar i munnen, vars pigment packas in i emaljen och ger tanden en mörkare färg över tid. God munhygien kan sakta ner processen, men när pigmenten redan har absorberats i tanden kan endast tandblekning med väteperoxid* ta bort dem. Personer med de flesta typer av missfärgningar kan uppnå en vitare nyans på sina tänder med hjälp av Brilliant Smiles tandblekning. Endast ett behandlingstillfälle är normalt tillräckligt för att uppnå märkbart vitare tänder med resultat som varar i flera år.

Vad menas med Brilliant Smile-metoden?

”Brilliant Smile-metoden” refererar till ett snabbt och säkert sätt att bleka tänder - med hjälp av både Brilliant Smiles utrustning och framför allt Brilliant Smiles tandblekningsgel. Alla våra produkter är

EU-godkända och pH-neutrale, vilket betyder att du som kund kan vara helt trygg när du väljer att bleka tänderna med Brilliant Smile Sweden.

Säker och effektiv behandling

Brilliant Smile är den ledande metoden i Sverige för tandblekning som ger bra resultat utan att kompromissa med munhälsan. Patienter som genomgår en behandling med Brilliant Smile behöver normalt inte återkomma för upprepade behandlingar för att bli nöjd. Vid tandblekning med andra metoder är biverkningar så som ilningar och bestående känslighet mycket vanliga. Lyckligtvis är biverkningar mer sällsynta med Brilliant Smiles tandblekning och ifall de förekommer är de snabbt övergående och ofarliga. Den främsta orsaken till detta är att vi bara använder pH-neutral gel (7) som dessutom innehåller tillsatser som återuppbygger emaljen och minimerar biverkningar. Vid ljusblekning används våra preparat i kombination med välbalanserat plasmaljus, som är helt fritt från skadliga våglängder.

preparat som inte är pH-neutrale vilket fräter på emaljen. Frätningskador är smärtsamt, ger långvariga besvär och mindre hållbara blekningsresultat, därför är alla Brilliant Smiles preparat pH-neutrale. Dessutom är vårt plasmaljus helt fritt från cancerframkallande UV-strålar och skadliga våglängder.

Innan behandlingen

För att försäkra sig om att du är en god kandidat för blekning ska en undersökning göras innan tandblekningsbehandlingen påbörjas. De allra flesta är goda kandidater för blekning, men har man exempelvis hål, tandsten eller eventuella skador bör detta åtgärdas först. Undersökningen genomförs ofta i samband med tandblekningsbehandlingen, eller maximalt tre månader innan blekningstillfället.

Våra behandlingar

Vi erbjuder flera typer av tandblekning, både för hemmabruk och för behandling på klinik. Som patient är det upp till dig att bestämma vilken typ av behandling du är mest bekväm med. Tandblekning på klinik är perfekt för dig som vill se resultat snabbt utan att behöva göra något själv. Givetvis kan du uppnå samma resultat när du bleker tänderna hemma, men det tar något längre tid.

Traditionell klinikblekning

- ”Original-behandlingen” som utförs på klinik
- Gelen finns i olika koncentrationer av väteperoxid
- Aktivering med Brilliant Smiles plasmaljus
- Påbörjas med noggrann putsning av tänderna
- Tandköttet skyddas med protector
- Ljusbehandlingen pågår i 3 x 7-20 min

Genomsnittsresultat: 7 nyanser

Hemblekning

- Gel och bettskena för tandblekning hemma
- Köps hos tandläkaren
- Skenan specialanpassas efter dina tänder
- Behandling pågår i 7 dagar
- Spara skenan och köp refill av gel hos tandläkaren

Genomsnittsresultat: 7 nyanser efter 1 vecka

re:fresh

- Enklare variant av blekning på klinik
- Gelen innehåller 6% väteperoxid
- Gelen appliceras i specialdesignad skena
- Aktivering med Brilliant Smiles plasmaljus
- Ljusbehandlingen pågår i 2 x 20 min
- Ytterligare 20 min kan läggas till mot extra avgift

Genomsnittsresultat: 3-5 nyanser

Whitening strips

- Smidig tandblekning hemma
- Transparenta engångsstrips, ena sidan täckt med väteperoxidgel (6%)
- Fäst direkt på tänderna, avlägsna efter 1-2 tim
- Behandling pågår i upp till 14 dagar

Genomsnittsresultat: 7 nyanser efter 2 veckor

Efter behandlingen

Där missfärgningarna tidigare har suttit finns efter behandlingen mikroskopiska ihåligheter, som lätt kan fyllas igen med nya missfärgningar. Under de första 72 timmarna efter behandling är det därför viktigt att:

- Undvika starkt färgade drycker, mat och tobak då detta kan försämra resultatet.
- Undvika sura livsmedel eftersom dessa kan orsaka överkänslighet.
- Skölja med fluor två gånger dagligen

NanoSeal Total+

Vid tandblekning på klinik finns det ett alternativ för dem som inte vill undvika missfärgande drycker etc. enligt instruktionerna ovan. De flesta kliniker

erbjuder mot en extra kostnad NanoSeal Total+, en skyddande försegling som appliceras på tänderna efter blekning, så att man kan äta och dricka vad som helst direkt efter behandlingen. NanoSeal Total+ återuppbygger emaljen direkt och minimerar därför även eventuella ilningar och känslighet.

Hur länge varar resultatet?

De missfärgningar som har försvunnit genom tandblekning är borta permanent, man kommer däremot samla på sig nya missfärgningar. Hur lång tid det tar för tänderna att bli missfärgade igen är väldigt individuellt och beror på kost och levnadsvanor. Normalt vill patienter göra om behandlingen efter 1-5 år.

Vad är det som bleker tänderna?

Väteperoxid är den vanligaste aktiva ingrediensen i tandblekningspreparat. *Det finns även ämnen som utsöndrar väteperoxid (ex. karbamidperoxid) som fungerar på liknande sätt. När väteperoxid oxideras frigörs fria syreradikaler som bryter ner organiskt material till koldioxid och vatten. Missfärgningarna som sitter i tänderna är till exempel rester från kaffe, tobak, mat etc. vilket är organiska material som bryts ner. Emaljen är inte organisk och påverkas därför inte.

Är tandblekning farligt?

Brilliant Smiles tandblekning är helt ofarlig, men det samma gäller dessvärre inte för alla tandblekningsmetoder. Väteperoxiden i sig bryter ner missfärgningar i tanden utan att skada eller förändra tandens emalj, men det som däremot kan skada emaljen är