



DAX Ytdesinfektion 75

DAX Ytdesinfektion 75 är avsedd för desinfektion av synligt rena ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. DAX Ytdesinfektion 75 är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.

Fördelar med DAX Ytdesinfektion 75

- 75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
- Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
- Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.

Ny förbättrad
formula

Gör så här/Dosering:

- Om ytan är smutsig, rengör den först med vanligt rengöringsmedel
- Dränk in en torkduk med utspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.
- Bearbeta ytan upprepade gånger.
- Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverknings tiden och låt lufttorka.
- Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontaktiden (se sidan 2 för kontaktid).



Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75, 500 ml spray	492-15	7331964004920	15
DAX Ytdesinfektion 75, 1000 ml	493-12	7331964004937	12

DAX Ytdesinfektion 75

Mikrobiologisk information

Bactericidal effekt

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek
Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa 5 min
Staphylococcus aureus 5 min
Enterococcus hirae 5 min
Escherichia coli 5 min

Yeasticidal effekt

EN 13624 Candida albicans 30 sek

EN 13697 Candida albicans 1 min

Fungicidal effekt

EN 13624 A. Brasiliensis 15 min

EN 13697 A. Brasiliensis 5 min

Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 30 sek
Murine Norovirus 30 sek
Limited Virucidal Efficacy

Mycobactericidal effekt

EN 14348 Terrae 1 min
Avium 1 min

Typ av formulering

- Vätska

Förpackningsmaterial

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

Hållbarhet:

Till utgångsdatum (tryckt på förpackningen)

Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75, 500 ml spray	492-15	7331964004920	15
DAX Ytdesinfektion 75, 1000 ml	493-12	7331964004937	12