

TRIOS 5/6

Rengöring och desinficering av MOVE, handstycke, spetsar, scannerlins.

Det är viktigt att man skiljer på rengöring av spetsar, lins och ytor på skannern.

Skannerns ytor (display, handstycke etc.):

Torkas av med **Cavi Wipes*** våtservetter med ytdesinfektion.

Skärmen är inte fukttät så eftertorka snabbt med en torr mjuk tork.

FLERGÅNGS-SCANNERSPETS:



- **Spetsen diskas rent för hand** med mildt handdiskmedel, vatten och en mjuk tork.

En mjuk borste kan användas på plastdetaljerna. **Diska inte i diskdesinfektor.**

- Skölj och torka torrt med en mjuk tork. Glaset är känsligt för repor vilket försämrar skanningresultatet. Spetsen beräknas hålla för ca 100 autoklaveringar.

Autoklavera: Spetsen ska vara diskad, avsköljd, torr, packad i försluten lufttät sterilpåse och köras med program 121/134 grader.

SKYDDSSPETSEN:



Skyddsspetsen kan enbart ytdesinficeras! Den tål **ej** diskdesinfektor eller autoklav. När handstycket är desinficerat ska skyddsspetsen sättas tillbaka.

SKANNERLINSEN:

Desinficeras endast vid behov med **Cavi Wipes*** och det är viktigt att direkt torka torrt med en mjuk tork så att inte yttes från Cavi Wipes får självdunsta från linsen. Detta kan orsaka en hinna på skannerlinsen som försämrar skannerresultatet.

Om det uppstår svårare fläckar på linsen får 70% odenaturerad ethanol användas för att försiktigt torka av linsen. Säljs som M-sprit eller U-Sprit på Apoteket.

Linsen är ett optiskt instrument som är mycket känslig för repor. Vidrör aldrig linsen med fingrarna.

***Mjuka tork kan beställas hos Unident AB med artikelnr:**

7020 Curi Med. 100 st/förp.

***Cavi Wipes artikelnr: 4731160 160 st/förp.**

Instruktioner skrivna efter 3Shapes rekommendationer och garantiregler.

*We'll back
you up*

 **UNIDENT®**