



Kalciumhydroxidpulver

Kalciumhydroxidpastakomponent för tillfällig rotfyllning av rotkanaler

Sammansättning

100 % kalciumhydroxid

Egenskaper

När kalciumhydroxidpulveret blandas med destillerat vatten bildar det en krämig pasta med ett pH på över 12.

Indikation

Tillfälligt rotfyllningsförband för endodontisk behandling.

Bruksanvisningar

Förbered, rengör och torka kanalen noggrant.

Blanda kalciumhydroxidpulvret med destillerat vatten så att du får en krämig pasta.

Fyll kanalen med pastan med hjälp av en Lentulo-spiral eller motsvarande instrument. Undvik att överfylla rotkanalsystemet för att förhindra risken för apikal extrusion.

Fyll håligheten med ett temporärt material för att säkerställa en tätning mellan behandlingstillfällena och för att undvika kontaminering av rotkanalsystemet.

Ta bort klistret helt och hållet vid nästa möte. Kalciumhydroxidpastan avlägsnas lätt med en endodontisk fil och några droppar saltlösning.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Anpassa pastavolymen i det apikala området till kanalens anatomiska form för att förhindra risken för överflöd.

Som ett tillfälligt rotfyllningsförband har pastan en maximal behandlingstid på 30 dagar.

Kontraindikation

Inga kända eller förväntade biverkningar vid användning enligt anvisningarna.



Varning

Denna produkt är tillverkad av kalciumhydroxid, en hudirriterande produkt som kan orsaka allvarliga ögonskador. Undvik kontakt med ögon, munslemhinnor och hud för att förhindra eventuell irritation eller skada. I enlighet med bästa kliniska praxis rekommenderas att patienten använder en damm, skyddsglasögon och en vattentät haklapp. Handskar, mask och skyddsglasögon ska bäras av den som utför behandlingen.

Vid kontakt med huden eller munslemhinnan, ta omedelbart bort produkten från vävnaderna och skölj noggrant med vatten. Om irritation av hud eller slemhinnor uppstår, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten i flera minuter medan du håller ögonlocket öppet. Ring genast till en läkare.

Om det sväljs, skölj munnen med vatten och drick mycket vatten. Sök läkarvård. Håll den exponerade personen i vila, framkalla inte kräkningar.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur mellan 5 °C och 25 °C, skyddad från ljus.

Hållbarhetstid

5 år. Använd inte om utgångsdatumet har passerat.

Kassering

Kassera den tomma burken i enlighet med lokala bestämmelser.

Förpackningsbeskrivning

Burk med 50g

REF

11025



För tandvårdspersonal
Tillverkad i Schweiz



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland