



Överraskande starkt

G-ænial®
Universal
Injectable
från GC

Komposit med
hög hållfasthet

GC

Överraskande starkt

För alla kavitetsklasser Täckande skikt behövs inte

Dr Anthony Mak, Australien



252 Al % röntgenkontrast
för optimal uppföljning.



Perfekta materialegenskaper:
helt kontrollerbart flöde såväl
vid applicering som vid sprutspetsens
avlägsnande.




Böjbara spetsar
underlättar åtkomst
till alla kaviteter



Materialet rinner
inte iväg utan blir
kvar där du applicerat det.



Enkel applicering
och bekvämt
grepp.

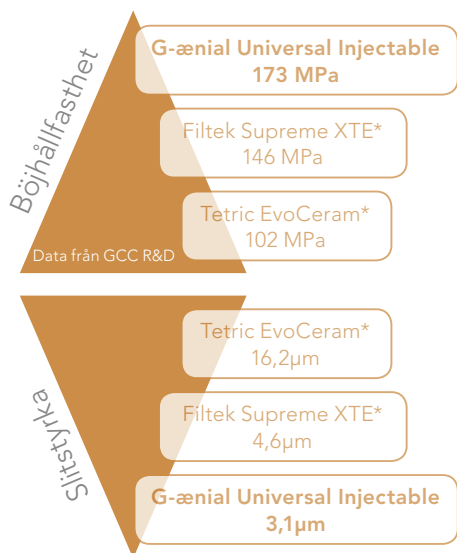


Ultrafina **fillerpartiklar**
av **barium** (150 nm)
och **hög fillermängd**.

FSC-teknologi
(**Full-coverage Silane**
Coating) förbättrar
fördelning och
vidhäftning
av fillermaterial
i matrix.

Exceptionella egenskaper.
Kladdar inte.
Enkelt att applicera.
Hög radiopacitet.

*Varumärken som inte tillhör GC.

Applicera direkt!

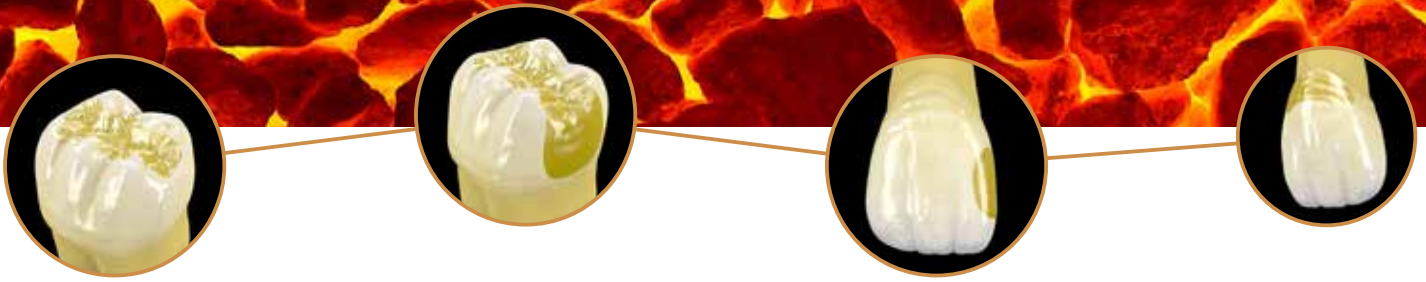

Klass II-restauration



Ursprunglig situation med approximal karies.



Den gamla restaurationen och karies avlägsnas.



Underskär kan enkelt nås med de böjbara spetsarna.



Approximalytan byggs upp med emaljfärgen JE.



Matrisen avlägsnas efter att ytan byggts upp.



En klass I-procedur kan nu påbörjas: dentinskiktet skapas med färgen A4.



Applicering av slutgiltigt emaljskikt med färgen JE.




Slutgiltigt resultat efter finishering och polering av kantanslutningarna.

Dr Javier Tapia Guadix, Spanien

Klass III-restaurationer



Ursprungliga klass III-kaviteter.

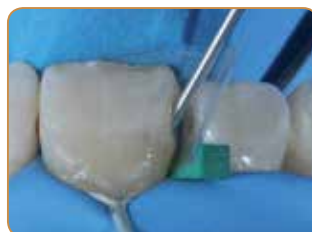

Applicering med G-ænial Universal Injectable (A2).



Resultat direkt efter behandling.



Perfekt integrering vid återbesök.

Dr Ahmed Al-Jaff, Irak

G-aenial® Universal Injectable från GC

Överlägsen estetik och bestående höggglans!



Dr Floriann Klumpp, Tyskland



Dr Ali Salehi, Frankrike

	Standardfärger											Dentinfärger			Emaljfärger	
	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
Spruta 1 ml (1,7g)	901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486



901503 - Långa applicerings-spetsar (30 st.)



Upptäck även GC:s universalbonding G-Premio BOND

- 009030 – G-Premio BOND, kit 5 ml
- 009036 – G-Premio BOND, flaska, refill, 5 ml
- 009032 – G-Premio BOND, 3 flaskor, refill, 3 x 5 ml
- 009034 – G-Premio BOND Unit Dose, 50 st.

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32 16 74 10.00
 Fax. +32 16 40 48 32
 info.gce@gc.dental
 http://www.gceurope.com

GC Nordic AB
 Strandvägen 54
 S-193 30 Sigtuna
 Sweden
 Tel:+46 768 544 350
 info.nordic@gc.dental
 http://nordic.gceurope.com



GAMA
 DENTAL AB

Box 42031, 126 12 Stockholm
 Tel 08-199400
 Email order@gama.se
 www.gama.se