

Rengöring och desinficering av

MOVE, HANDSTYCKE, SPETSAR, SCANNER- LINS & KALIBRERINGSKIT TILL TRIOS MOVE 3

Denna instruktion beskriver hur man rengör de olika delarna på TRIOS 3 MOVE.

Det är viktigt att man skiljer på rengöring av spetsar, ytor på scannern och kalibreringsutrustningen.

RENGÖRING SCANNERSPETS:



Under skanningssessionen blir spegeln kontaminerad - använd odenaturerad alkohol (Etanol eller Propanol) för att torka av spegeln. Finns att beställa på apotek som M-Sprit eller U-Sprit 70%.

Ej ytdesinfektion. Torka torrt direkt. Låt inte etanolen självdunsta från spegeln.

VIKTIGT ATT MAN INTE kör spetsen i autoklaven direkt efter att man har använt etanol. Diska först av den med diskmedel i ljummet vatten. (Det orsakar annars att etanolen bränner fast på spegeln)

- **Spetsen diskas rent för hand** med mildt diskmedel, gärna YES, vatten och en mjuk tork. En mjuk borste kan användas på plastdetaljerna.

Diska inte i diskdesinfektor, då förstörs spegeln.

- Skölj och torka torrt med en mjuk tork. Spegeln är ett optiskt instrument som är mycket känslig för repor vilket försämrar scanningresultatet.

Spetsen beräknas hålla för ca 150 autoklaveringar.

Autoklavera: Spetsen ska vara diskad, avsköljd, torr, packad i försluten lufttät sterilpåse och köras med program 121/134 grader.

RENGÖRING SKYDDSPETS:



Skyddsspetsen kan enbart ytdesinficeras! Den tål **EJ** diskdesinfektor eller autoklav.

RENGÖRING AV SCANNERNS YTOR (DISPLAY, HANDSTYCKE ETC.):

Torkas av med ytdesinfektion, 60-70% ethyl alkohol, isopropanol eller etanol. Spraya inte direkt på skärmen utan använd en lätt fuktad tork.

Skärmen är inte fukttät så eftertorka gärna med en torr mjuk tork.

RENGÖRING SCANNERLINS:

Desinficeras med odenaturerad etanol och det är viktigt att direkt torka torrt med en mjuk tork så att inte etanolen får självdunsta från linsen. Detta kan orsaka en hinna på skannerlinsen som försämrar skannerresultatet. Linsen är ett optiskt instrument som är mycket känslig för repor. Vidrör aldrig linsen med fingrarna.

När handstycket har ytdesinficerats ska skyddsspetsen sättas på.


3D-KALIBRERINGSKIT:



- Kan torkas av på utsidan med denaturerad alkohol om det behövs. Absolut inte på insidan. Vid behov blås rent insidan med torr luft.

FÄRGKALIBRERINGSKIT:

OBS! På Färgkalibreringsmålet (den med A och B sida) får kalibreringsytorna ej vidröras eller komma i kontakt med vätskor. Rengörs endast med torr luft vid behov.

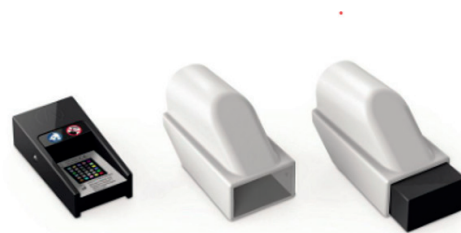

Färgkalibreringsadaptern (grå hylsa) kan handdiskas och desinficeras/steriliseras i autoklav vid behov.

Färgkalibreringskitet har ett utgångsdatum som står på bak-kanten. När datumet har utgått ska ett nytt färgkalibreringskit beställas på Unident AB, scanner-supporten. 0346-73 24 25.

OBS! Den grå adaptern ska alltid bytas ut samtidigt och den gamla ska kasseras. Dessa två delar tillverkas samtidigt och de har en speciell passform tillsammans.



Mjuka tork kan beställas hos Unident AB med artikelnr:

7020 Curi Med. 100 st/förp.

Instruktioner skrivna efter 3Shapes rekommendationer och garantiregler.

*We'll back
you up*

 **UNIDENT®**